



Gebruiksaanwijzing

MKK-QR2 "Fixy QR"

Polshouder Quick Release



Beoogde gebruiker:

Dit medisch hulpmiddel is bestemd voor gebruik door medisch professionals.

Beoogd doeleind:

Een polsband beperkt de bewegingsruimte van de arm, ter voorkoming van automutilatie, uittrekken van medisch materiaal, zoals infusen of slangen.

Indicaties voor gebruik:

- Patiënten die risico lopen een levensreddende behandeling te onderbreken door het infuus los/uit te trekken.
- Patiënten die risico lopen om slangen los te trekken waarmee gemonitord wordt.
- Patiënten die plukken, trekken en/of krabben, waardoor zij zichzelf verwonden of reeds bestaande wonden vergroten.

Contra-indicaties:

- Niet toepassen bij patiënten die erg agressief, geagiteerd of suïcidaal zijn.
- Niet toepassen bij patiënten patiënten:
 - o Als de plaats van het infuus of de wond aangetast wordt door de polsband.
 - o Met een breuk of ontwrichting van de hand.

Potentiële complicaties:

Er kunnen zich ernstige emotionele, psychische en/of lichamelijke problemen voordoen wanneer de aangebrachte polsband niet comfortabel zit of het bewegen ernstig belemmert. Als deze problemen of symptomen zich voordoen om welke reden dan ook, schakel dan de hulp in van een arts en kies voor een minder vrijheidsbeperkend middel of interventie.

Productomschrijving:

Verpakking

Het product is per paar verpakt in een transparant zakje.

Opslag en handling

- Dit product is ontworpen voor gebruik in een binnenomgeving.
- Dit product kan worden opgeslagen bij normale vochtigheidsniveaus bij normale magazijntemperaturen. Voorkom overmatig vocht of hogere luchtvochtigheid waardoor producten kunnen beschadigen.



REF MKK-QR2

Samenstelling:
polyester, polyurethaan, katoen

Uitleg van symbolen



Fabrikant



Fabricagedatum



Medisch hulpmiddel



Catalogusnummer



Batchnummer



Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor gebruik



Eenmalig gebruik



Houd droog



Houd weg van zonlicht



Niet steriel



Niet gebruiken wanneer de verpakking beschadigd is





Gebruiksaanwijzing:

Voor gebruik:

Volg deze stappen om het hulpmiddel toe te passen 1-7

1. Wikkel de verbindingsband eenmaal om een beweegbaar deel van het bedframe, buiten het bereik van de patiënt. Sluit de quick release sluiting. Luister of u een “klik” geluid hoort. Trek stevig aan de riemen om een goede verbinding te garanderen.
2. Wikkel de manchet van de polsband om de pols van de patiënt, zodat de gesp en de verbindingsriem zich aan de buitenkant van de pols bevinden (tegenover de duim).
3. Bevestig de klittenbandsluiting. Schuif EEN vinger (plat) tussen de manchet en de binnenkant van de pols van de patiënt om een goede pasvorm te garanderen. De riem moet strak zitten, maar mag de circulatie niet belemmeren.
4. Sluit de quick release sluiting op de manchet. Steek TWEE vingers (plat) onder de gesp en trek de riem strak, maar niet zo strak om de bloedsomloop te beperken.
5. Maak de gesp met de quick release sluiting los, draai en sluit opnieuw aan. Luister of u een “klik” geluid hoort.
6. Bevestig het ‘haak’-uiteinde van de polsband aan de ‘fuzzy’-achterkant van de manchet om te voorkomen dat de quick release sluiting losschuift.
7. Pas de bedband(en) aan om de gewenste bewegingsvrijheid toe te staan, zonder de veiligheid van patiënt of zorgverlener in gevaar te brengen.

Monitor volgens het beleid van de instelling of het ziekenhuis om er zeker van te zijn dat:

- De banden veilig zijn aangebracht. Als deze te strak zitten, zal de bloedsomloop belemmerd worden. Wanneer ze te los zitten, zal de patiënt in staat zijn de hand van de polsband te laten glijden.
- De bedbevestigingslinten niet een andere richting op kunnen schuiven of loslaten.
- De polsbanden intact zijn, niet gescheurd of beschadigd zijn, haken en lussen van de klittenband sluiten veilig. Sta patiënten NIET toe om onderdelen van de band door te slikken.
- De patiënt niet in staat is door gebruik van zijn of haar tanden of anderszins de polsband los te maken en zichzelf te verwonden.
- De patiënt nauwlettend gemonitord wordt wanneer deze uit bed is. Patiënten die lopen terwijl zij een polsband dragen, lopen het risico om zich te bezeeren wanneer zij vallen.

Enmalig gebruik:

Dit is een wegwerpproduct. Gooi het product weg volgens het voorzorgsbeleid voor biologisch gevaarlijke materialen van de instelling of het ziekenhuis. Hergebruik van dit product kan kruisbesmetting en productbeschadigingen veroorzaken. Human Protection B.V. kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor risico's die ontstaan door hergebruik van wegwerpproducten.

LET OP! Net zoals het gedrag van een patiënt niet 100% voorspelbaar is, is geen enkel product 100% onfeilbaar. Patiëntveiligheid vereist regelmatig herbeoordeling en monitoring van het product en situatie. Een product wat eerder werkte, kan mogelijk zijn doel missen als de mentale of fysieke gezondheidstoestand van de patiënt verandert. Gebruik NOOIT producten waarvan u aanvoelt dat ze onveilig zijn. Raadpleeg de juiste medische instantie als u vragen heeft over de patiëntveiligheid.

**Overige waarschuwingen:**

1. Onjuiste toepassing of gebruik van vrijheidsbeperking kan leiden tot ernstig letsel of de dood.
2. Monitor de patiënt altijd volgens het beleid van de instelling of het ziekenhuis.
3. Houd er rekening mee dat permanent toezicht vereist kan zijn voor:
 - o Agressieve of geagiteerde patiënten en
 - o Patiënten die kans lopen hun braaksel door te slikken. Hier vallen ook patiënten in rugligging of die niet rechtop kunnen zitten onder. Als de patiënt braakt kan hij of zij het braaksel inslikken en daarin stikken.
 - o Ben voorbereid om in te grijpen bij het eerste teken van gevaar. Deze patiënten vereisen frequente controle en evaluatie van hun fysieke en psychische gesteldheid.
4. Wijzig of repareer dit product NOOIT. Controleer ALTIJD voor elk gebruik op: kapotte stiksels of onderdelen; gescheurde, afgesneden of gerafelde materialen of sluitingen, gespen of klittenbandbevestigingen die niet goed aan elkaar vastplakken. Gebruik GEEN vuile of beschadigde producten. Dit kan leiden tot ernstig letsel of de dood. Voer beschadigde producten af volgens het beleid voor biologisch gevaarlijk materiaal van de instelling of het ziekenhuis.
5. Bevestig de linten ALTIJD aan een deel van het bed of stoelframe buiten bereik van de patiënt. Test om ervoor te zorgen dat de linten niet kunnen worden aangetrokken, losgemaakt waardoor overmatige speling ontstaat. Als dit gebeurt kan de patiënt van de stoel of bed afglijden, waardoor het risico op ernstig letsel of verstikking toeneemt. Het losmaken van vrijheidsbeperkende hulpmiddelen is een belangrijk onderdeel van ontruimings- en rampoefeningen. Linten kunnen in geval van nood met een schaar worden doorgeknipt.
6. Gebruik NOOIT vrijheidsbeperkende producten op toiletten of op een stoel of meubilair als deze daarop niet kunnen worden aangebracht volgens de gebruiksaanwijzing van het product. Gebruik het product NIET in de thuissituatie.
7. Stel dit product NOOIT bloot aan een open vuur, smeulende materialen of andere hittebronnen. Sommige producten kunnen smelten of ontbranden en vlam vatten.
8. Gebruik NOOIT een fixatieproduct als veiligheidsgordel in een bewegend voertuig. Vrijheidsbeperkende producten zijn niet bestand tegen de kracht van een botsing of plotseling halthouden.
9. Rapporteer ernstige incidenten ALTIJD aan Human Protection B.V., de distributeur en aan de verantwoordelijke lokale autoriteiten.